

## *Dermaden*

Перед применением крема внимательно и до конца прочитайте инструкцию. Настоящая инструкция содержит краткую информацию о креме.

«Дермаден» - безопасный гипоаллергенный крем, основанный исключительно на натуральных компонентах и имеющий статус медицинского изделия без каких-либо предупреждений. В случае возникновения дополнительных вопросов обратитесь к фармацевту или лечащему врачу.

### 1. Фармакологические свойства и показания к применению

Крем «Дермаден» способствует заживлению ран, в том числе пролежней, диабетических ран, ожогов и некрозов. «Дермаден» принадлежит к группе мембранных белков фосфолипидного типа с двойным слоем и содержит 5 веществ, обеспечивающих лечение и заживление ран несколькими способами одновременно, в том числе:

- уничтожает бактерии и обеспечивает защиту от них;
- обеспечивает чистоту и увлажнение области повреждения;
- мгновенно снижает боль;
- быстро стягивает открытые раны без образования рубцов;
- ускоряет выздоровление и защищает края раны;
- удаляет омертвевшие ткани без хирургического вмешательства;
- ослабляет неприятный запах от раны, причиной которого являются бактерии.

### 2. Принцип действия:

Крем быстро облегчает боль, удаляет выделения из раны и способствует ее очищению от бактерий. В процессе заживления и удаления выделений в области раны могут наблюдаться опухание и покраснение, пока все выделения не будут удалены. После применения на повязке могут появляться следы выделений (желтоватого/зеленоватого оттенков), что является частью естественного процесса заживления раны.

\*\*\* Крем не является лекарственным средством, а предназначен для помощи при лечении ран (как отмечено выше) \*\*\*\*\*

### 3. Состав:

«Дермаден» содержит: деминерализованную воду, пчелиный воск, карнаубский воск, глицерин, сорбитол, пропилен-гликоль, олеиновую, лауриновую, стеариновую и миристиновую кислоты, фруктозу, гидроксид калия, L-лизин, смесь

полиакрилата натрия, этилгексил стеарат, тридецет-6, феноксиэтанол и трипептид.

#### 4. Противопоказания и предупреждения перед использованием:

Крем не предназначен для пациентов с чувствительностью и/или аллергией на любой из его ингредиентов.

Если вы обладаете повышенной чувствительностью к каким-либо пищевым продуктам или мазям, сообщите об этом вашему врачу перед использованием крема. Используйте крем только для той цели, для которой он был выписан.

Не смешивайте его с другими кремами.

Если в течение нескольких дней самочувствие не улучшается или наблюдаются ухудшения, немедленно обратитесь к врачу.

#### 5. Применение:

Крем наносится на раны просто, легко и безболезненно.

Наносите крем два-три раза в день в соответствии с инструкцией по применению.

#### Инструкция по применению:

Для лечения ран:

- очистите и промойте рану теплой водой (25-30°C);
- просушите рану с помощью мягкой марли или чистого полотенца;
- дайте ране высохнуть на воздухе в течение приблизительно 10 минут;
- нанесите крем толстым слоем, покрыв всю поверхность раны, включая края раны.

Можно покрыть рану повязкой:

- сухие раны: прозрачной пленкой (полиуретановой) или пропитанной парафином марлей с фиксацией неклеящимся бинтом;
- раны с небольшими выделениями: нетканой марлей с фиксацией неклеящимся бинтом или клеящимся гипоаллергенным бинтом;
- раны с умеренными выделениями: впитывающей неклеящейся марлей с фиксацией неклеящимся бинтом или клеящимся гипоаллергенным бинтом.

После каждого применения необходимо использовать новую повязку.

Лечение ожогов и некрозов:

- очистите и промойте рану теплой водой (25-30°C);
- просушите рану с помощью мягкой марли или чистого полотенца;
- нанесите крем на рану толстым слоем. Перевязывать рану не обязательно;

- если крем впитался, нанесите его повторно толстым слоем.

#### 6. Условия хранения:

Крем следует хранить в сухом, прохладном и затемненном месте (при температуре 5-20 градусов) вдали от источников тепла.

Крем следует хранить в недоступном для детей месте.

После вскрытия рекомендуется хранить тюбик в холодильнике при температуре 5-10°C до истечения срока годности, указанного на упаковке.

Не используйте крем после истечения срока годности, указанного на упаковке (Expiry date). Даже при соблюдении рекомендуемых условий упаковки/хранения крем имеет ограниченный срок службы. Обратите внимание на дату истечения срока годности. В случае сомнений проконсультируйтесь с фармацевтом, у которого был приобретен крем. Не храните различные лекарства/крема в одной упаковке.

Одобрено министерством здравоохранения, регистрация медицинского изделия №24790009

Производитель и владелец регистрации:

«Пеэр фарм Лтд», рег. №511899023

Израиль, 809256, Рош ха-Аин, ул. Ха-Амаль, 17

Тел. 03-9024055

Компания-дистрибьютор:

Aigis Labs LTD.

Тель-Авив, ул. Ибн-Гвироль, 30

Тел. 076-5990603