

Dermaden™

יש לקרוא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש במשחה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על המשחה. **דרמדן™** הינה משחה בטוחה, היפואלרגנית, המבוססת על חומרים טבעיים בלבד ומדורגת כאביזר רפואי ללא כל אזהרות. במידה וישנן שאלות נוספות יש לפנות לרוקח או לרופא המטפל.

1. מאפייני המשחה (למה מיועד התכשיר?):

דרמדן™ הינה משחה המיועדת לסייע בטיפול בפצעים; לרבות פצעי לחץ, פצעים סוכרתיים, כוויות ונמקים. **דרמדן™** משתייכת לקבוצת ממברנות חלבוניות מסוג פוספוליפידים בשכבה כפולה ומכילה 5 מערכות התומכות בטיפול והחלמה של פצעים במספר מנגנונים. המשחה מסייעת בטיפול ובריפוי הפצעים במספר דרכים:

- מנטרלת ומגנה מפני חיידקים
- שומרת על ניקיון הפצע ועל סביבה לחה
- מפחיתה כאב באופן מהיר
- מאחה וסוגרת בצורה מהירה פצעים פתוחים מבלי להותיר צלקות
- מזרזת החלמה מהירה ומגנה על שולי הפצע
- מסירה רקמת נמק ללא התערבות כירורגית
- מפחיתה את ריח הפצע שמקורו מחיידקים

2. עקרון הפעולה של המשחה:

המשחה פועלת באופן מהיר להקלת כאבים, להוצאת הפרשות מהפצע ופועלת לניקוי הפצע מחיידקים. במהלך תהליך הריפוי והוצאת הפרשות, איזור הפצע עלול להתנפח ולהאדים עד אשר כלל ההפרשות יפוגו מהפצע. סימני הפרשה עלולים להופיע על גבי הגאזה והינם חלק מתהליך החלמה הטבעי של הפצע.

*** אין מדובר בתרופה והמוצר מיועד לסייע בטיפול בפצעים (כפי שמצוין לעיל)***

3. הרכב:

דרמדן™ מכילה: Purified Water, Bees wax, Carnuaba wax, Glycerin, Sorbitol, Lauric acid, Glyceryl oleate, Myristic acid, Stearic acid, Propylene Glycol, Sodium Polyacrylate & Ethylhexyl Stearate & Trideceth-6, Potassium Hydroxide, Lysine hcl, Glycine, Histidine, Arginin, Fructose, Phenoxyethanol

4. אזהרות מיוחדות לפני השימוש במשחה:

המשחה איננה מיועדת למטופלים עם רגישויות ו/או אלרגיות לאחד ממרכיבי המשחה. אם אתה רגיש למזון כלשהו או למשחה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני השימוש במשחה. אין להשתמש במשחה למטרה שונה מזו שלשמה נרשמה. אין לערבב עם משחות אחרות.

אם תוך מספר ימים לא חל שיפור במצב או אף חלה הרעה, יש לפנות לרופא בהקדם.

5. כיצד להשתמש במשחה?

השימוש במשחה על פצעים נעשה באופן פשוט, קל ונטול כאבים. יש למרוח את המשחה פעמיים-שלוש ביום ובהתאם להוראות השימוש.

הוראות השימוש:

לטיפול בפצעים:

- יש לנקות ולשטוף את הפצע במים פושרים (25-30°C)
- יש לייבש את הפצע באמצעות גזה רכה או להשאירו לייבוש באוויר במשך כ 10 דקות
- יש למרוח את הפצע בשכבה עבה של משחה ולכסות את כל פני הפצע במשחה
- במידה והפצע שטחי יש לכסות במשחה גם את שולי הפצע, במידה ולפצע יש עומק, יש למלא את כל עומק הפצע במשחה, ללא אזור השוליים
- להשגת אפקט מירבי, יש לחזור על הפעולה כ 2-3 פעמים ביום ובהדרגתיות ניתן לרדת לפעם ביום

ניתן לכסות את הפצע באמצעות גאזה:

- פצעים יבשים: פילם שקוף (פוליוריתן) או גאזה פרפין מקובעת ע"י תחבושת לא דביקה
- פצעים מפרישים בצורה קלה: גזה מבד לא ארוג, מקובעת על ידי תחבושת לא דביקה או סרט דביק היפו אלרגני
- פצעים מפרישים בצורה בינונית: גאזה סופגת לא דביקה מקובעת על ידי תחבושת לא דביקה או סרט דביק היפו אלרגני
- לאחר כל מריחת שכבה חדשה, יש לוודא החלפת התחבושת/גאזה בתחבושת חדשה

לטיפול בנמקים:

- יש לנקות ולשטוף את אזור הנמק במים פושרים (25-30°C)
- יש לייבש את אזור הנמק באמצעות גזה רכה
- יש למרוח אזור הנמק בשכבה עבה של משחה, כולל אזור השוליים שמסביבו
- יש למרוח את המשחה 2-3 פעמים ביום לפי מידת הצורך ועל האיזור להניח פד-גאזה, לספיחת הפרשות שצפויות בימים הראשונים לשימוש
- לאחר הסרת שכבת הנמק, יש לעבור לשימוש לפי ההוראות לטיפול בפצעים

לטיפול בכוויות:

- יש לנקות ולשטוף את אזור הכוויה במים פושרים (25-30°C)
- יש לייבש את הכוויה באוויר
- יש למרוח את אזור הכוויה בשכבה עבה של משחה. אין חובה לחבוש את הכוויה, אולם ניתן לסגור בפד גאזה פשוט ואוורירי לספיחת הפרשות במידה וישנן
- יש לשמור על אזור הכוויה לח
- אין הגבלה על מספר המריחות ביום
- יש להמשיך למרוח את המשחה עד לטשטוש מלא של הכוויה והצלקת

6. כיצד לאחסן את המשחה?

יש לשמור את המשחה במקום קריר, יבש ומוצל (טמפרטורה של 25-3 מעלות) הרחק ממקור חום.

יש לאחסן את המשחה במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ותינוקות.

לאחר הפתיחה אנו ממליצים לשמור את השפורפרת בקירור (10-3 מעלות) עד לתאריך התפוגה המוטבע על גבי האריזה.

(Expiry date) אין להשתמש במשחה לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, משחות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של המשחה. בכל מקרה של ספק עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את המשחה. אין לאחסן תרופות/משחות שונות באותה אריזה.

באישור משרד הבריאות, אישור אמ"ר מספר : 24790009

שם היצרן ובעל הרישום :

פאר פארם בע"מ, ח.פ. 511899023

רחוב העמל 17, ראש העין, ישראל, 809256


טלפון 03-9024055

בעבור :

Aigis Labs LTD.

Even Gbirol 30, Tel – Aviv

Tel – 076-5990603

קרא בעיון את העלון טרם השימוש במוצר. 



מספר אצווה, תאריך ייצור ותאריך תפוגה מיוצרים על גבי האריזה.

